



lymphamat[®]
GRADIENT

Multi-Jacket

Jackenmanschette

- Einfache Handhabung
- Hoher Tragekomfort durch leichte Materialien
- Größenanpassung durch Erweiterungssätze möglich
- Einseitig anwendbar (12 Kammern)
oder beidseitig (24 Kammern)

passion for compression
www.lymphamat.de



lympa-mat®

GRADIENT

Multi-Jacket

Die Jackenmanschette – nachhaltige Entstauung

Indikationen

- **Armlymphödeme** mit Beteiligung von Rücken und Thorax (in Kombination mit manueller Lymphdrainage)
- **Lipödeme**


Kontraindikationen

- dekompensierte Herzinsuffizienz
- ausgedehnte Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht
- Erysipel
- schwere, nicht eingestellte Hypertonie
- akutes Weichteiltrauma der Extremitäten
- Neuropathie
- okkludierende Prozesse im Lymphabstrombereich
- Kompartmentsyndrom
- Akute Phlegmone

Neben der manuellen Lymphdrainage und der Versorgung mit Kompressionsstrümpfen ist die intermittierende Pneumatische Kompression (IPK) eine weltweit anerkannte Methode bei der Behandlung von Ödemen, die sich durch Innovationen aus dem Anwenderbereich stetig weiterentwickelt.

Eine übergangslose intermittierende Kompressionsmethode bei Armödemem mit Einschluss der oberen Rumpfquadranten wird durch die Jackenmanschette umgesetzt. Diese ermöglicht eine aktive Kompression des gesamten Oberkörpers. Der Kompressionsaufbau beginnt an den Fingerspitzen und gleitet über die Arme in den Rücken-Thorax- und Bauchbereich.

Der intermittierende Druckauf- und -abbau regt die Lymphvasomotorik an, die Ödemflüssigkeit wird mobilisiert, und deren Abtransport nachhaltig gefördert. Durch die gradiente Kompression wird einer möglichen Verschiebung von Ödemflüssigkeit in andere Rumpfquadranten vorgebeugt.

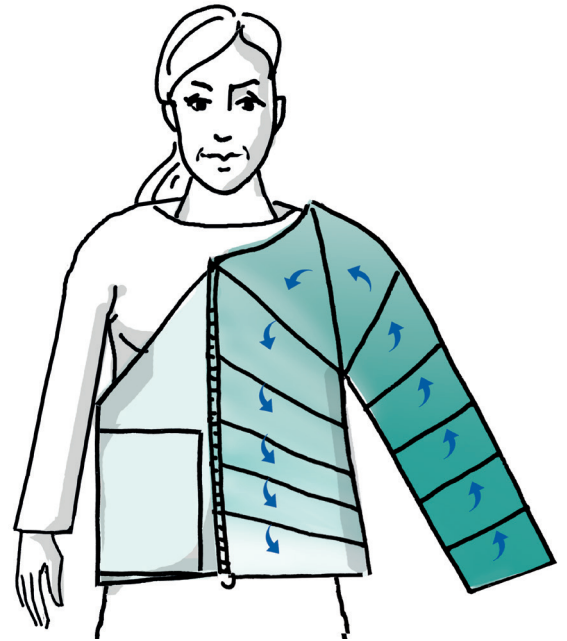

Gradienter Behandlungsdruck

Die Jackenmanschette wird bei einem Kompressionszyklus nacheinander in 12 Stufen mit Luft befüllt. Dabei wird ein abnehmendes Druckgefälle realisiert. Dadurch wird gewährleistet, dass die mobilisierte Flüssigkeit ohne Rückfluss ungehindert abströmen kann.



**1/2 Jackenmanschette
mit 12 Luftkammern rechts
mit Bolereo
Art.-Nr. 1182**




**1/2 Jackenmanschette
mit 12 Luftkammern links
mit Bolereo
Art.-Nr. 1181**



**Jackenmanschette
mit 24 Luftkammern
Art.-Nr. 1180**



BÖSL Medizintechnik GmbH
Gut-Knapp-Straße 14
D-52080 Aachen, GERMANY
Telefon +49(0)2405 / 6 93 90 - 00
Telefax +49(0)2405 / 6 93 90 - 10
info@boesl-med.de · www.boesl-med.de

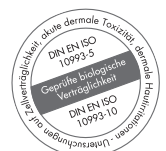

Made in Germany