



lympho-mat®
GRADIENT

Multi-jacket

Jackmanchet

- Eenvoudige bediening
- Hoog draagcomfort door lichte materialen
- Maataanpassing mogelijk door uitbreidingssets
- Kan aan één kant worden gebruikt (12 kamers)
of dubbelzijdig (24 kamers)

passion for compression
www.lymphamat.de



lympa-mat®

GRADIENT

Multi-jacket

Indicaties

- **lymfoedeem van de arm** met betrokkenheid van de rug en thorax (in combinatie met manuele lymfedrainage)
- **lipoeedeem**

Contra-indicaties

- gedecompenseerd hartfalen
- uitgebreide tromboflebitis, trombose of vermoedelijke trombose
- Erysipelas
- ernstige, ongecontroleerde hypertensie
- acuut wekedelentrauma van de extremiteiten
- Neuropathie
- occluderende processen in het lymfedrainagegebied
- Compartimentsyndroom
- Acute flegmone


De jackmanchet - Duurzame decongestie

Naast manuele lymfedrainage en het gebruik van compressiekousen is intermitterende pneumatische compressie (IPC) een methode voor de behandeling van oedeem die wereldwijd wordt erkend en voortdurend verder wordt ontwikkeld door innovaties van de gebruikerssector.

Een naadloze intermitterende compressiemethode voor armoedeem met opname van de bovenste kwadranten van de romp wordt uitgevoerd door de jackmanchet. Hierdoor wordt een actieve compressie van het gehele bovenlichaam mogelijk gemaakt. De compressieopbouw begint bij de vingertoppen en glijdt over de armen naar de rug, de borstkas en de buikstreek.

De intermitterende verhoging en verlaging van de druk stimuleert het lymfatische vasomotorische systeem, het oedeemvocht wordt gemobiliseerd en de afvoer ervan wordt duurzaam bevorderd.

De gradiëntcompressie voorkomt de mogelijke verplaatsing van oedeemvocht naar andere kwadranten van de romp.

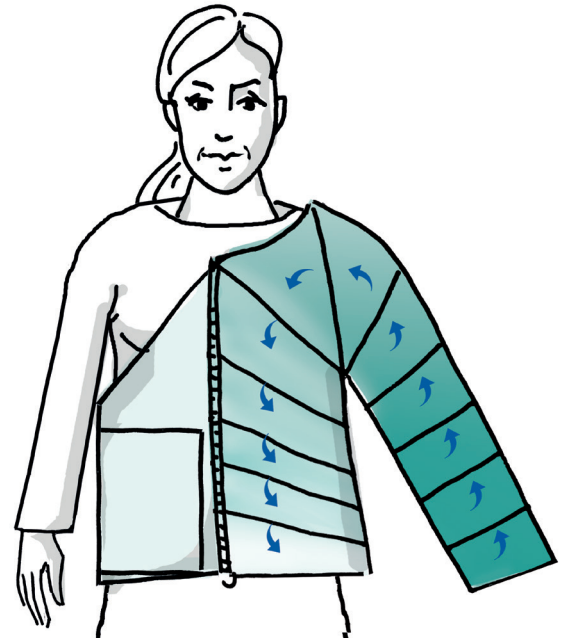

Gradiënt behandelingsdruk

De manchet wordt tijdens een compressiecyclus achtereenvolgens in 12 fasen met lucht gevuld. Daarbij wordt een dalende drukgradiënt gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat de gemobiliseerde vloeistof ongehinderd kan wegstromen zonder terugstroming.



**1/2 jackmanchet
met 12 luchtkamers rechts
met bolereo
art. nr. 1182**



**1/2 jackmanchet
met 12 luchtkamers links
met bolereo
art. nr. 1181**



**Jackmanchet
met 24 luchtkamers
art.nr. 1180**



Bösl Medizintechnik GmbH
Gut-Knapp-Straße 14
D-52080 Aachen, GERMANY
Telefoon +49(0)2405 / 6 93 90 - 00
Fax +49(0)2405 / 6 93 90 - 10
info@boesl-med.de · www.boesl-med.de

Made in Germany

